

Bedienungsanleitung NeuroNation MED

Revision: 4 | Datum: 04.11.2022

Willkommen bei NeuroNation MED!

Entdecken Sie Ihr wahres Potenzial und starten Sie Ihr wissenschaftliches Gehirntaining. Die NeuroNation MED Anwendung wurde entwickelt, um Ihren Kopf auf vielfältige Weise spielerisch zu trainieren. Wir bieten eine große Anzahl spielerischer Übungen, die nicht nur effektiv sind, sondern auch Spaß machen! Unsere Übungen helfen Ihnen, Ihr Gedächtnis und Ihre Aufmerksamkeit, sowie das umfangreiche Verknüpfen verschiedener Sachverhalte zu trainieren.

NeuroNation MED führt eine Analyse Ihrer Stärken und Potentiale durch und erstellt für Sie einen persönlichen Trainingsplan. Hierbei handelt es sich um gezielte geistige Übungen, welche durch wiederholte Durchführung einen oder mehrere kognitive Bereiche des Gehirns gezielt stimulieren. Diese Übungen absolvieren Sie in individuellen Einheiten mit wachsenden Schwierigkeitsgraden, angepasst auf Ihren Trainingserfolg.

NeuroNation MED

Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für:

- NeuroNation MED v.1.0.0 oder höher



eIFU indicator

ACHTUNG: Lesen Sie sich vor der Anwendung die Anweisung aufmerksam durch. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Therapeuten, sollten Sie Fragen oder Unklarheiten über die Benutzung dieser Anwendung haben. Des Weiteren steht Ihnen das NeuroNation MED Support-Team für Anfragen zur Verfügung.

Funktionsweise

Die NeuroNation MED Applikation ist eine mobile Anwendung eines computer-basierten kognitiven Trainings, die auf spielerischen Übungen diverser kognitiver Funktionen basiert (Multi-Domain Cognitive Training). Für das Trainieren dieser Fähigkeiten stehen innerhalb der Anwendung unterschiedlichste Aufgaben zur Verfügung. Diese können einzeln ausgewählt oder innerhalb einer Trainingseinheit personalisiert zusammengestellt durchgeführt werden.

Dabei vermittelt die Anwendung zudem Informationen zu kognitiven Beeinträchtigungen und dem gezielten Training, stellt Entspannungsübungen, sowie Lerntechniken vor und unterstützt Sie bei deren Umsetzung. Zusätzlich bietet die Anwendung Erinnerungsfunktionen, um das Gehirntaining und die Inhalte der Übungen zu vertiefen und im Alltag zu integrieren.

NeuroNation MED ist für die Eigenanwendung bestimmt. Es werden keine Hilfsmittel bei der Anwendung benötigt.

Die NeuroNation MED Anwendung ist geeignet für jeden Anwender ab 18 Jahren, mit einer leichten oder mäßigen kognitiven Beeinträchtigung.

Nutzungsvoraussetzungen

Für die Benutzung der Anwendung benötigen Sie eine E-Mail Adresse, sowie ein internetfähiges Smartphone oder Tablet.

Für eine optimale Anwendung, werden folgende Geräte unterstützt:

- iPhone/iPad/iPod Touch (iOS 11.0 oder höher)

- Smartphone/Tablet (Android 5.0 oder höher)

Zweckbestimmung

NeuroNation MED soll Patienten dabei unterstützen, die Symptome von leichten oder mittelschweren, erworbenen oder neurodegenerativen kognitiven Beeinträchtigungen zu lindern.

Anwendergruppe

Bei diesem Produkt ist der Nutzer der Patient. Das Produkt ist für Patienten ab 18 Jahren geeignet, die an den oben genannten Symptomen leiden und in der Lage sind, ein handelsübliches Smartphone zu bedienen. Der Patient benötigt keine medizinischen Vorkenntnisse für die Nutzung von NeuroNation MED und muss nicht gesondert geschult werden.

Indikation

NeuroNation MED ist indiziert bei leichter oder moderater, erworbener oder neurodegenerativer kognitiver Beeinträchtigung.

Kontraindikation

Für die Anwendung von NeuroNation MED sind keine Kontraindikationen oder Anwendungseinschränkungen bekannt.

Anwendungsdauer

Als Anwendungsdauer wird eine gesamte netto Trainingszeit von mindestens 18 Stunden in jeweils drei wöchentlichen Lerneinheiten von 30 - 40 Minuten empfohlen.

Vorsichtsmaßnahmen and Warnungen

Vorsicht

Lesen Sie die Anweisungen vor der Anwendung sorgfältig durch. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten, wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten bei der Nutzung dieser Anwendung haben. Darüber hinaus steht Ihnen der NeuroNation MED Kundendienst für alle Fragen zur Verfügung.

Warnungen



- Mit NeuroNation MED können keine Diagnosen Ihrer Erkrankung gestellt werden. Potentiell gefährliche Ursachen einer Erkrankung können hiermit nicht ausgeschlossen werden und die Anwendung ersetzt keine ärztliche Beratung. Bitte wenden Sie sich bei Fragen bezüglich Ihrer Diagnose an Ihren Arzt.
- Das Training ersetzt keine medizinische Behandlung. Bitte kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt, sollten Sie eine Verschlechterung Ihrer Symptome feststellen.

Hilfe

Bei Fragen, Problemen mit der Anwendung oder sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns einfach über das Hilfe Menü in Ihrer App oder unter info@neuronation-med.com.

Gewährleistung



NeuroNation MED ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Richtlinie (EU) 93/42/EWG über Medizinprodukte und dem Medizinproduktegesetz.

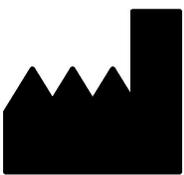
Wenn Sie als Anwender oder als behandelnder Arzt / Therapeut eine Verschlechterung des Gesundheitszustands feststellen, welche möglicherweise mit der Benutzung von NeuroNation MED in Verbindung steht, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.

Rechtliche Hinweise

Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle (Schäden, Verletzungen, etc.) an info@neuronation-med.com, sowie der zuständigen Behörde.

In Deutschland ist die zuständige Behörde das BfArM. Aktuelle Kontaktinformationen finden Sie auf der Webseite des BfArMs: [Startseite](#) [e](#).

Kennzeichnung

Symbol	Erklärung
	Herstellerangaben
 eIFU indicator	Elektronische Gebrauchsanweisung beachten
	Sicherheitshinweis
	CE-Zeichen (Communauté Européenne). Ein Produkt mit diesem Zeichen erfüllt die Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinie, d. h. der geltenden europäischen Norm.

Disclaimer

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist der Synaptikon GmbH ein wichtiges Anliegen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt nach den strengen Vorgaben des in der EU und in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Datenschutzrechts unter dem Grundsatz der Datenvermeidung, Datentransparenz und Datensicherheit.

Hersteller

Synaptikon GmbH



Friedrichstraße 68

10117 Berlin, Germany

Email: info@neuronation-med.com

Sollten Sie eine Papier-Version dieser Gebrauchsanweisung benötigen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.